

Caesar's Diamonds medical nitrilitutkimuskäsine, sininen

Nämä kertakäyttöiset ei-steriilit tutkimus- ja suojakäsineet ovat tarkoitettu käytettäväksi lääketieteen alalla. Käsineiden tarkoitus on potilaan ja käyttäjän suojaaminen ristikontaminaatiolta, lääketieteellisten tutkimusten suorittaminen sekä saastuneen materiaalin käsittely. Käsineet ovat luokiteltu lääkinnällisten laitteiden luokkaan I ja henkilökohtaisten suojavarusteiden luokkaan III

- Tuotteen nimi: nitrilitutkimuskäsine
- Materiaali: nitrilikumi
- Pinta: teksturoidut sormenpäät
- Väri: sininen
- Tyyppi: puuteroimaton tutkimuskäsine, ei steriili, rullattu reunus
- Hyväksytty laaturaja AQL S3: reikäkoe 1.5
- Pakkauksen sisältö: 100kpl
- Käyttöaika: 5 vuotta valmistuspäivästä

Käsineen profiili							
Koko	Malli	REF	Ranne	Kämmen	Sormenpäät	Leveys	Paino
XS	BS 020-N01	BS0102016	Min. 0.05mm	Min. 0.07mm	0.08mm	75mm	3.0g
S	BS 020-N01	BS0102017	Min. 0.05mm	Min. 0.07mm	0.08mm	85mm	3.5g
M	BS 020-N01	BS0102018	Min. 0.05mm	Min. 0.07mm	0.08mm	95mm	4.0g
L	BS 020-N01	BS0102019	Min. 0.05mm	Min. 0.07mm	0.08mm	105mm	4.5g
XL	BS 020-N01	BS0102020	Min. 0.05mm	Min. 0.07mm	0.08mm	115mm	5.0g

Lääkintälaitedirektiivi

Lääkintälaitedirektiivi MDR 2017/745, luokka I. Basic UDI-DI 69332655EM01021562864B, EMD T01020204, SRN numero CN-MF-0000011339. Ilmoittava laitos TÜV SÜD PSB Pte Ltd, 15 International Business Park, TÜV SÜD @ IBP, Singapore 609937. Phone: +65 6973 6363

Henkilökohtainen suojavarusteluokka

Henkilökohtainen suojavarusteluokka: III, suojakäsineet kemikaaleja ja mikro-organismeja vastaan
Ilmoittava laitos on EU tyyppi-tarkastanut tämän henkilösuojaimen suojainasetusten (EU) 2016/425 mukaisesti

Ilmoittava laitos

Satra Technology Europe Limited (2777)
Bracetown Business Park Clonee D15Y N2P
Ireland Tel: +353 1 437 2484

- Luokka: suojakäsineet kemikaaleja ja mikro-organismeja vastaan, kemiallinen suojataso B
- Henkilökohtainen suojavarusteluokka EU 2016/425: kategoria III, moduuli C2 mukaiset tarkastukset
- Tyyppihyväksyntäsertifikaatin numero on 2777/11521-02/EE00-00
- Sertifikaatin päiväys 9.11.2018. Sertifikaatti on voimassa 9.11.2023 asti

Suojaustaso

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 / Type B

Kemikaali	Taso	EN ISO 374-4:2019 muutos %
40% Natriumhydroksidi (K)	6	-38,4 %
30% Vetyperoksidi (P)	2	17,6 %
37% Formaldehydi (T)	5	46,6 %

EN ISO 374-5:2016

KOKO	Taso
Suoja bakteereita ja viruksia vastaan	Hyväksytty
Suoja homekasvustoa vastaan	Hyväksytty

Ruokakontakti

Käsinepakkaukseen on merkitty ruokakontakti ikoni ja ne soveltuvat kaikenlaisten ruokien käsittelyyn.
Rajoitukset: Ei rajoituksia

Soveltuvuus ruokakontaktiin asetusten 1935/2004(EY), 2023/2006(EY) ja 10/2011 (EY) mukaan.
Testimenetelmät EN 1186-1:2002, EN 1186-2:2002 ja EN 1186-9:2002

Stimulantti	Aika	Lämpötila	Sallittu raja	Kokonaissiirtymä	Taso
3% Etikkahappo	2h	70°C	10 mg / dm ²	< 5,3 mg / dm ²	Hyväksytty
10% Etanoli	2h	70°C	10 mg / dm ²	< 5,8 mg / dm ²	Hyväksytty
Puhdistettu oliiviöljy	2h	70°C	10 mg / dm ²	< 6,4 mg / dm ²	Hyväksytty

Varastointi / Hävittäminen

Säilytys kuivassa paikassa 5-35 ° C. Vältä altistumista suoralle auringonvalolle ja loistevalolle. Varaston suositeltava suhteellinen kosteus on 60 ± 20%. Älä säilytä liuottimien, öljyjen, polttoaineiden ja voiteluaineiden välittömässä läheisyydessä. Käytetyt käsineet voivat olla tarttuvien tai muiden vaarallisten aineiden saastuttamia. Ne tulee hävittää paikallisten määräysten mukaisesti.


Varoitukset

Ei saa käyttää uudelleen eikä huoltaa millään tavoin. Materiaalit voivat aiheuttaa allergisen reaktion herkkäihoiselle. Lisätietoja käsiineessä olevista aineista on saatavana pyynnöstä.

Vaatimuksenmukaisuustodistukset

Vaatimuksenmukaisuustodistukset ovat ladattavissa internetsivulta: www.caesars.fi

Ohje kertakäyttökäsineiden pukemiselle

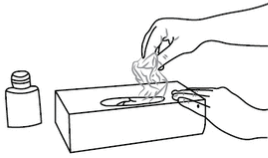

1. Suorita ensin käsihygieniatoimenpiteet. Ota ensimmäinen käsine laatikosta.




2. Tartu kiinni ainoastaan kertakäyttökäsineen suuaukon reunaan.




3. Pue ensimmäinen käsine.



4. Ota seuraava käsine pois laatikosta koskemalla ainoastaan käsineen suuaukon reunaa.

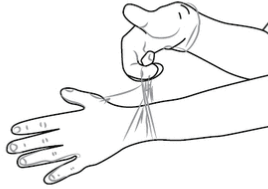


5. Vältä koskemasta rannetta ja käsivartta. Laita sormi käsineen reunan alle, kieräytä reuna sormen yli ja pue toinen käsine.

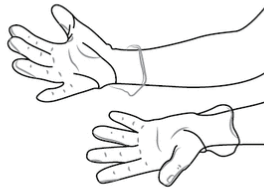


6. Älä käytä käsiä muuhun kuin käyttöohjeiden mukaiseen tarkoitukseen.


Ohje kertakäyttökäsineiden riisumiselle

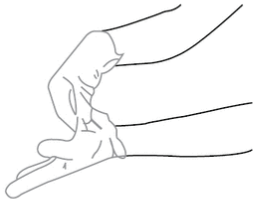

1. Ota kiinni nipistämällä käsineen ranneosasta. Vältä kosketusta kyyrärvarren ihon kanssa. Anna käsineen kääntyä nurinpäin samalla kun vedät käsineen pois kädestä.

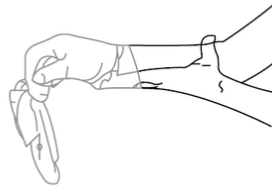

2. Pidä kiinni riisutusta käsiinestä. Työnnä vapaan käden sormet puettuna käsineen reunan alle ja vedä käsine pois kädestä siten että rullaat ensimmäiseksi riisutun käsineen toisen käsineen sisälle pussiin.

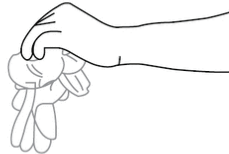

3. Hävitä käsiinest asianmukaisesti ja suorita käsihygieniatoimenpiteet.

Symbolit



Valmistaja



Ilmoittavan laitoksen numero ja CE logo



Lääkinnällinen edustaja EU:ssa



Eudamed UDI-DI numero



Lääkinnällinen tuote



EN455-1-4 Lääkinnällisen käsineen standardi



Hyväksytty laaturaja



Kemikaalisuoja K, P, T



Sarjanumero



Valmistusaika



Viimeinen käyttöpäivä



Luettelonumero



Maahantuoja



Pakkaus voidaan kierrättää



Soveltuu elintarvikkeiden käsittelyyn



Suoja viruksia ja mikro-organismeja vastaan



Lue käyttöohjeet



Kertakäyttöinen



Lateksiton



Ei steriili



Vältä varastoinnissa UV säteitä



Älä altista kosteudelle varastoidessa

Valmistaja

Blue Sail Medical, Ltd
Qilu Chemical Industrial Park No 21 Qingtian Road
Zibo Shandong, People's Republic of China
P. +86 0533 7871098

EU edustaja

Lotus NL B.V. Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA
The Hague, Netherlands
Puh. +31 644168999



Maahantuoja

Caesar's Diamonds Oy
Niittyläntie 2 C 309 00620 Helsinki Finland
p. +358 400 882 067
info@caesars.fi